

Mepiform littekensheet

Productinformatie

Mepiform, dun, flexibel, zelfklevend siliconen littekensheet; voor de behandeling van oude en nieuwe hypertrofische en keloïde littekens. 

Het steriele littekensheet is op de wondcontactzijde voorzien van de gepatenteerde Safetac* siliconen laag. De verbanden met een siliconen laag hebben een positieve invloed op littekenweefsel. Voor een optimaal resultaat dient het verband bij voorkeur 24 uur per dag gedragen te worden. De totale behandeling zal, afhankelijk van het klinische beeld, tussen de 3 en 12 maanden bedragen. De rugzijde van het verband is van nonwoven met polyurethaan, deze is vocht- en waterdampdoorlaatbaar en waterdicht.

*Safetac technologie: wondcontactlaag en/of de fixatielaag is vervaardigd van zachte siliconen; in contact met de wond verkleeft het verband niet aan het vochtige wondbed. Zelfs in moeilijke omstandigheden, als het wondvocht kleverig wordt of opdroogt, garanderen de zachte siliconen verbanden een minimum aan pijn en trauma bij verbandwisselingen.

Op de omliggende huid bieden de zachte siliconen verbanden een uiterst vriendelijke fixatie. Verwijdering van het verband brengt geen huidbeschadiging ("stripping" van de epidermale cellen) met zich mee. Hierdoor blijft de huid zelfs na meerdere verbandwisselingen onbeschadigd en zijn de wisselingen nagenoeg pijnloos. Ook wondinspectie is geen probleem. De kleefkracht van de producten is zo goed dat ze ook na meerdere inspecties volledig functioneel blijven.



Zachte siliconen verbanden zorgen er tevens voor dat wondvocht niet doorlekt naar de gezonde huid die er omheen ligt. De siliconen schermen de wondranden volledig af waardoor het overtollig wondvocht alleen verticaal kan passeren.

Specificatie:

- littekensheet
- siliconen laag, Safetac
- rugzijde nonwoven met polyurethaan
- dun
- flexibel
- zelfklevend
- steriel

Toepassen:

- voor de behandeling van oude en nieuwe hypertrofische (verdikt rood litteken, dat zich niet uitbreidt buiten het oorspronkelijke wondgebied) en keloïde (littekenvorming die buiten de grenzen van de oorspronkelijke huidlaesie optreedt) littekens

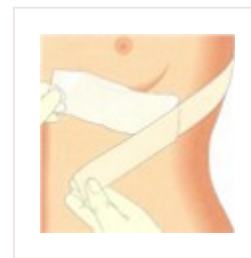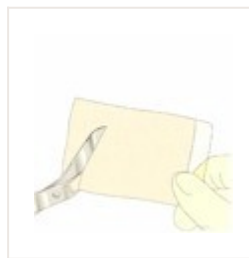

Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3070955	Mepiform Safetac Siliconen Littekenverband 4x31cm 293150 Steriel	5 st.	50 st.	15330702
	3070956	Mepiform Safetac Siliconen Littekenverband 5x7cm 293250 Steriel	5 st.	25 st.	15330710