

# mediven ulcer kit+ compressie koussysteem been AD CCL 3

## Productinformatie

Mediven ulcer kit+, compressie koussysteem bestaande uit onderkous, bovenkous en aan-/uittrekhulp; te gebruiken bij de behandeling van veneuze ulcera.

Set bestaat uit twee onderkousen, een bovenkous en een Mediven aan-/uittrekhulp.  Het systeem wordt toegepast als verbandkous en is een alternatief voor compressiezwachtels. De duur van het zwachtelen kan aanzienlijk worden verkort. De onderkous dient ter bescherming en fixatie van het wondverband en vereenvoudigt het aantrekken van de bovenkous. De onderkous wordt in principe 24 uur per dag gedragen. De onderkous bestaat uit 71% polyamide, 28% elasthaan en 1% zilver. Het zilver dat in de onderkous is verwerkt heeft een antibacteriële werking, waardoor de wondomgeving minder gevoelig is voor infecties. De onderkous kan gewassen worden op 95°C. De onderkous is aan de onderkant voorzien van een inspectie-opening.

De bovenkous (compressiekous) geeft druk op het been die nodig is om het ulcus te laten genezen en wordt alleen overdag gedragen. De compressiekous bestaat uit 75% polyamide en 25% elasthaan. De bovenkous is beige van kleur. De druk op de enkel van 40mmHg (nominaal) en het drukverloop van distaal naar proximaal is net meer afhankelijk van de zwachteltechniek. Het systeem bespaart tijd; het aanleggen van een korte rek zwachtel kost over het algemeen meer tijd dan het aantrekken van de onder- en bovenkous.

 Het systeem ondersteunt de zelfredzaamheid van de patiënt; het maakt een betere persoonlijke hygiëne en het dragen van normaal schoeisel mogelijk.

Het systeem is gemakkelijk aan en uit te trekken, de onderkous zorgt ervoor dat de compressiekous makkelijker over het been glijdt.

Specificatie:

- compressie koussysteem
- kniekous (AD)
- CCL 3
- druk op enkel 40mmHg
- tijdbesparend
- ondersteuning zelfredzaamheid
- gemakkelijk aan en uit te trekken

Bovenkous:

- 75% polyamide en 25% elasthaan
- overdag te dragen

- CCL 1
- druk op enkel 20mmHg

#### Onderkous:




- 71% polyamide, 28% elasthaan en 1% zilver
- 24 uur te dragen
- antibacterieel
- CCL 1
- druk op enkel 20mmHg
- inspectieopening

#### Indicatie:

- behandeling van veneuze ulcera (beenwond, "open been", zweer aan onderbeen meestal door slechte doorbloeding ten gevolge van hart- en/of vaatlijden)

#### Contra-indicatie:

- arteriële (aderlijke) doorbloedingsstoornissen
- rechter ventrikel insufficiëntie (slechte werking van rechter hartkamer)
- massaal beenoedeem (vochtophopingen in been)
- longoedeem (vochtophopingen in longen)
- pregangreneus letsel (letsel voor het afsterven van weefsel)
- neuropathie (zenuwziekte)
- intolerantie (allergie) voor materiaal kous

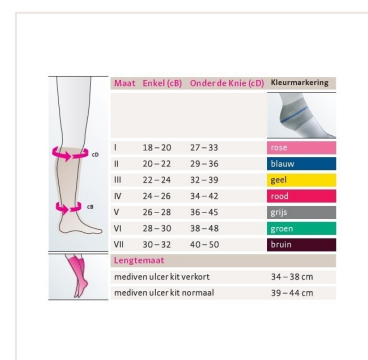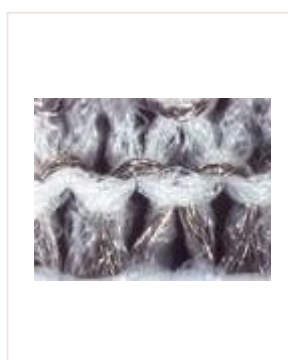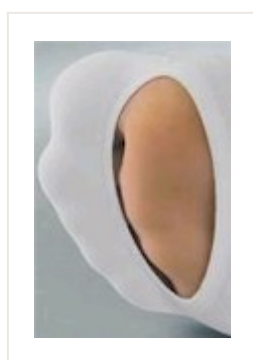

## Artikeloverzicht

|                                                                                     | Artikelnr. | Omschrijving                                                     | binnendoos | buitendoos | ZI-nummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | 3001469    | Mediven Ulcer Kit+ Maat 3 Enkel<br>22-24cm Verkort Open Teen 4st | 1 st.      | 4 st.      | 15554953  |

|                                                                                     | Artikelnr. | Omschrijving                                                                   | binnendoos | buitendoos | ZI-nummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|    | 3068748    | Mediven Ulcer Kit Verbandkous 2-laags<br>Maat 7 Plus Kort Gesloten Teen3827077 | 1 st.      | 3 st.      | 15555003  |
|    | 3068745    | Mediven Ulcer Kit Verbandkous 2-laags<br>Maat 2 Plus Kort Gesloten Teen3827072 | 1 st.      | 3 st.      | 15554945  |
|    | 3068743    | Mediven Ulcer Kit Verbandkous 2-laags<br>Maat 7 Plus Gesloten Teen 3820077     | 1 st.      | 3 st.      | 15554929  |
|                                                                                     | 3001473    | Mediven Ulcer Kit+ Maat 7 Enkel<br>30-32cm Verkort Open Teen 4st               | 1 st.      | 4 st.      | 15555003  |
|    | 3001471    | Mediven Ulcer Kit+ Maat 5 Enkel<br>26-28cm Verkort Open Teen 4st               | 1 st.      | 4 st.      | 15554988  |
|                                                                                     | 3001468    | Mediven Ulcer Kit+ Maat 2 Enkel<br>20-22cm Verkort Open Teen 4st               | 1 st.      | 4 st.      | 15554945  |
|                                                                                     | 3001466    | Mediven Ulcer Kit+ Maat 7 Enkel<br>30-32cm Normaal Open Teen 4st               | 1 st.      | 4 st.      | 15554929  |
|    | 3060755    | Mediven Ulcer Kit+ Maat 6 Enkel<br>28-30cm Normaal Open Teen 4st               | 1 st.      | 1 st.      | 15554910  |
|   | 3001464    | Mediven Ulcer Kit+ Maat 5 Enkel<br>26-28cm Normaal Open Teen 4st               | 1 st.      | 4 st.      | 15554902  |
|  | 3060821    | Mediven Ulcer Kit+ Maat 4 Enkel<br>24-26cm Normaal Open Teen 4st               | 1 st.      | 1 st.      | 15554899  |
|  | 3001462    | Mediven Ulcer Kit+ Maat 3 Enkel<br>22-24cm Normaal Open Teen 4st<br>3820073    | 1 st.      | 4 st.      | 15554880  |
|  | 3060513    | Mediven Ulcer Kit+ Maat 2 Enkel<br>20-22cm Normaal Open Teen 4st               | 1 st.      | 4 st.      | 15554872  |