

Revamil Collagen collageenverband

Productinformatie

Revamil Collagen, wondverband van collageen en honing; voor de behandeling van zowel chronische, geïnfecteerde als acute wonden.

Het steriele wondverband is samengesteld uit 60% natuurlijk collageen en 40% zuivere honing. Het collageen versnelt het verplaatsen van fibroblasten, stimuleert de vorming van nieuw granulatieweefsel en vormt een raster voor huidvernieuwing. Verder werkt collageen als lokaal hemostaat, waardoor bloedingen onder controle worden gehouden. De honing heeft een hoog enzymgehalte, waardoor langdurige antibacteriële bescherming plaats vindt. Door de osmotische werking en het lage pH-gehalte van honing vormt het wondverband een antibacteriële beschermingslaag over de wond. Door de combinatie van collageen en honing is er een versneld weefselherstel en een sterke vermindering van ontsteking rondom de wond. Als het wondverband in aanraking komt met exsudaat vormt het een gel, die zich naar de wond vormt. Het wondverband wordt geleidelijk door het lichaam opgelost en opgenomen. Het wondverband fixeren met steriel gaas of niet-occlusief secundair verband. Bij exsudaat afdekken met een licht absorberend secundair verband.

Specificaties:

- collageenverband
- antibacterieel
- 60% natuurlijk collageen
- 40% zuivere honing
- hemostatisch
- gelvormend
- resorbeerbaar
- steriel

Toepassen bij:

- ulcera met vertraagde wondheling
- veneuze en diabetische ulcera
- doorligwonden
- oncologische wonden
- 1ste e 2de graads brandwonden
- chirurgische wonden
- traumabehandelingen
- tandheelkundige behandelingen
- lokaal hemostaat bij capillaire bloeding



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3036499	Revamil Collagen Wondverband 5x5cm Honing Steriel Biologiq 11120	3 st.		16005678