

Actico UlcerSys compressie koussysteem been AD CCL 3

Productinformatie

Actico UlcerSys, compressie koussysteem bestaande uit een bovenkous en een onderkous; voor de behandeling van veneuze ulcera (open been).

De rondbrei bovenkous met open teen is gemaakt van 65% polyamide en 35% Lycra. De fijne oppervlaktestructuur zorgt ervoor dat de bovenkous gemakkelijk kan worden aangetrokken. Het platte boord aan de open teen en de ingebreide hiel zorgen voor draagcomfort. De bovenkous geeft een druk van 26-34 mmHg en mag alleen overdag gedragen worden. De bovenkous wordt over de onderkous gedragen.

De rondbrei onderkous heeft een gesloten teen en is gemaakt van 70% polyamide en 30% Lycra. Door de onderkous in meerdere lagen over elkaar te dragen kan de gewenste druk zelf bepaald worden. Bij het dragen van 1 onderkous is de druk 10-14 mmHg, bij 2 onderkousen 24 mmHg en bij 3 onderkousen 36 mmHg. Er mogen maximaal twee tot drie onderkousen over elkaar gedragen worden. Het boord aan de bovenkant van de onderkous zorgt dat de kous goed blijft zitten. De tricot samenstelling zorgt voor een goede pasvorm. De platte naad bij de tenen en de ingebreide hiel zorgen voor draagcomfort. De onderkous fixeert wondverbanden en beschermt de huid. De onderkous mag overdag en 's nachts gedragen worden.

Het compressiekoussysteem geeft een druk van circa 40 mmHg, drukklasse 3.

Specificatie:

- compressie koussysteem
- beenkous (AD)
- CCL 3
- bovenkous; overdag dragen, 26-34 mmHg
- onderkous; overdag en 's nachts dragen, 10-14 mmHg
- koussysteem circa 40 mmHg, drukklasse 3

Toepassen bij:

- behandelen van ulcus cruris venosum (open been) na oedeemvermindering
- ter voorkoming van een terugkerend chronisch open been
- huidontsteking met stuwing
- veneus oedeem
- behandelen van een posttrombotisch syndroom (chronische aandoening aan bloedvaten)
- nabehandeling bij sclerotherapie (behandeling spataders) en varicesoperaties (operatie spataders)

- na het uitnemen van een ader voor een bypassoperatie (hartoperatie)



Actico® Ulcersys Compressiekoussysteem					
+ Zonderkous (2) per instelling					
Maat	Enkelomvang	Kuitomvang	Compressiekoussysteem		
S O	48 cm		Articelnr.	Z-index nr.	
Beenlengte D 38 - 42 cm (Normaal)					
S	19-21	31-39	32 010	16542223	
M	21-23,5	33-41	32 012	16542224	
L	23-27	35-44	32 014	16542225	
XL	27-32	39-48	32 016	16542226	
XXL	32-37	43-52	32 018	16542227	
Beenlengte D 48 cm (lang)					
S	19-21	31-39	32 011	16542228	
M	21-23,5	33-41	32 013	16542229	
L	23-27	35-44	32 015	16542230	
XL	27-32	39-48	32 017	16542231	
XXL	32-37	43-52	32 019	16542232	

Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3050758	Actico Ulcersys Compressiekoussysteem Beige/wit Enkelomvang 23-27cmkuitomvang 35-44cm Beenlengte >42cm Maat L Lang (1 Bovenkous + 2 Zonderkousen) 32515	1 st.	1 st.	16542282
	3050757	Actico Ulcersys Compressiekoussysteem Beige/wit Enkelomvang 23-27cm Kuitomvang 35-44cm Beenlengte 38-42cm Maat L Normaal (1 Bovenkous + 2 Onderkousen) 32514	1 st.	1 st.	16542274
	3050756	Actico Ulcersys Compressiekoussysteem Beige/wit Enkelomvang 21-23,5cmkuitomvang 33-41cm Beenlengte >42cm Maat M Lang (1 Bovenkous + 2 Zonderkousen) 32513	1 st.	1 st.	16542266
	3050753	Actico Ulcersys Compressiekoussysteem Beige/wit Enkelomvang 19-21cm Kuitomvang 31-39cm Beenlengte 38-42cm Maat S Normaal (1 Bovenkous + 2 Onderkousen) 32510	1 st.	1 st.	16542223
	3050830	Actico Ulcersys Compressiekoussysteem Beige/wit Enkelomvang 27-32cmkuitomvang 39-48cm Beenlengte >42cm Maat XL Lang (1 Bovenkous + 2 Zonderkousen) 32517	1 st.	1 st.	16542304
	3050759	Actico Ulcersys Compressiekoussysteem Beige/wit Enkelomvang 27-32cmkuitomvang 39-48cm Beenlengte 38-42cm Maat XL Normaal (1 Bovenkous + 2 Zonderkousen) 32516	1 st.	1 st.	16542290
	3050831	Actico Ulcersys Compressiekoussysteem Beige/wit Enkelomvang 32-37cm Kuitomvang 43-52cm Beenlengte 38-42cm Maat Xxl Normaal (1 Bovenkous + 2 Onderkousen) 32518	1 st.	1 st.	16542312

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3050755	Actico Ulcersys Compressiekoussysteem Beige/wit Enkelomvang 21-23,5cm Kuitomvang 33-41cm Beenlengte 38-42cm Maat M Normaal (1 Bovenkous + 2 Onderkousen) 32512	1 st.	1 st.	16542258
	3050754	Actico Ulcersys Compressiekoussysteem Beige/wit Enkelomvang 19-21cm Kuitomvang 31-39cm Beenlengte >42cm Maat S Lang (1 Bovenkous + 2 Onderkousen) 32511	1 st.	1 st.	16542231